



# Manual of Infection Control Inside Dental Clinic.

## 院内感染予防製品のフローチャート

### ■ 高圧蒸気滅菌対応製品（基本セット、外科、インプラント、歯周、歯内、印象用トレー、バー、ドリルなど）

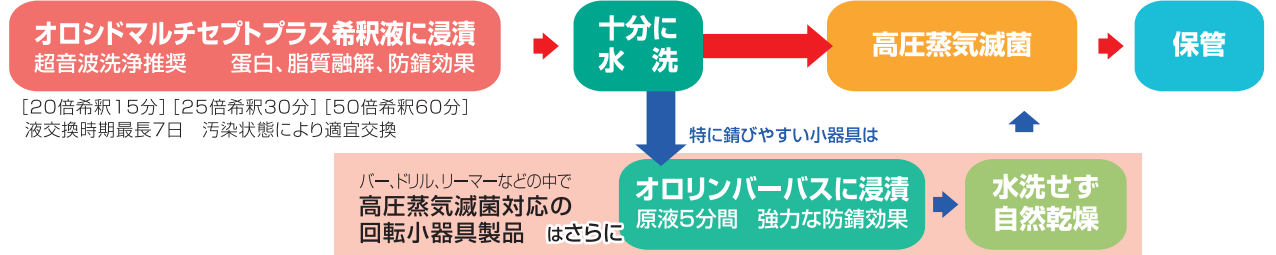

### ■ 高圧蒸気滅菌非対応製品（非耐熱、非耐圧製品）

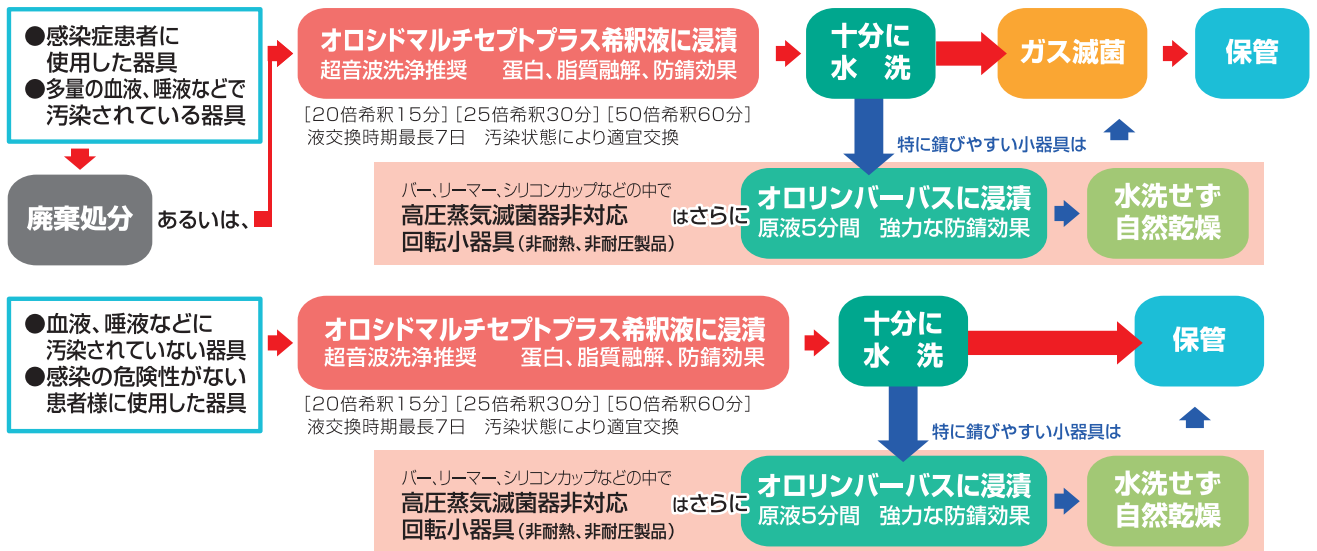

### ■ バキューム回路




### ■ ユニット、チェア、テーブルや小器具などの表面



### ■ 床、カベ



### ■ 印象材表面

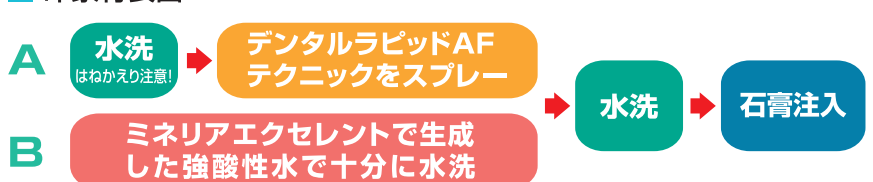

#### 【重要な注意】

● 感染症患者使用器具は薬液に浸漬後 必ず高圧蒸気滅菌器等で滅菌するか廃棄してください  
 感染性プリオンのような未知の感染性蛋白や細菌、ウイルスが存在する可能性がある為  
 のような消毒薬でも薬液だけの滅菌では不完全です 【欧州基準】

● 超音波洗浄器を使用することにより効果は1.5倍になります  
 ● 御使用の各製品が高圧蒸気滅菌器に対応しているかいないかはメーカーにお問い合わせください  
 ● 特殊なインプラント製品の滅菌はメーカーの指示に従ってください